

# Anleitung Schritt für Schritt

## BIL QS

### Qualitätssicherung

### Überprüfung des Photometers mit Kontrollkappen



**1.** 20 Kontrollkappen mit lyophilisiertem Kontrollserum


**BIL QS:** Bilirubin (Erwachsene), Bilirubin N (Neugeborene)




**2.** Kontrollkappe auf eine Küvette des zu prüfenden Tests aufschrauben

Gut mischen

Die Küvette enthält jetzt eine Probe mit einer bekannten Konzentration

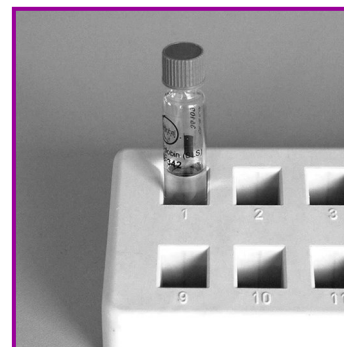

**3.** Küvette 1 Minute stehen lassen

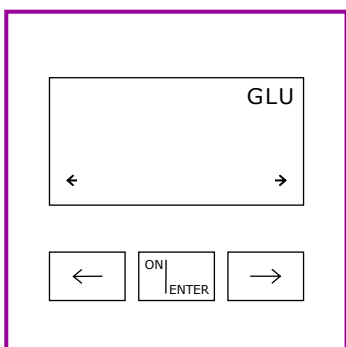

**4.** Gerät mit ON/ENTER einschalten

Gerätecheck abwarten, mit ON/ENTER bestätigen

Gewünschten Test auswählen, mit ON/ENTER bestätigen



**5.** Nullpunkteinstellung: Küvette mit Probe (Bild 3) in das Photometer stellen, Nullpunkt wird vom Gerät gespeichert

Nach Signalton Küvette entfernen



**6.** Kontrollkappe gegen Startkappe des zu prüfenden Tests austauschen



**7.** Küvette mehrmals über Kopf schwenken



**8.** Zuerst ON/ENTER drücken, danach Küvette in das Photometer stellen

Messwert abwarten

Ergebnis mit dem Zielwert auf der Packungsbeilage vergleichen