

## Anleitung Schritt für Schritt

LAC 142 / LAC 342 / GLU 142 / CHO 142 / TRI 142

### Einzelmessung




**1.** Kapillare mit 10 µL Probe in die geöffnete Küvette stellen



**2.** Probe mit Mikropipetter ausstoßen und mehrfach spülen




**3.** Verschlusskappe wieder aufschrauben  
Küvette mehrmals über Kopf schwenken

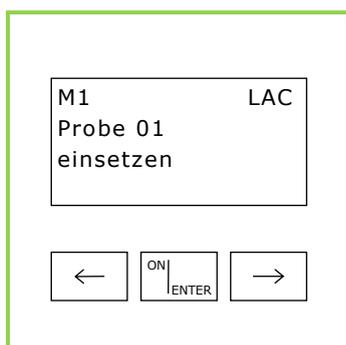

**4.** Gerät mit ON/ENTER einschalten

Gerätecheck abwarten, mit ON/ENTER bestätigen

Gewünschten Test auswählen, mit ON/ENTER bestätigen

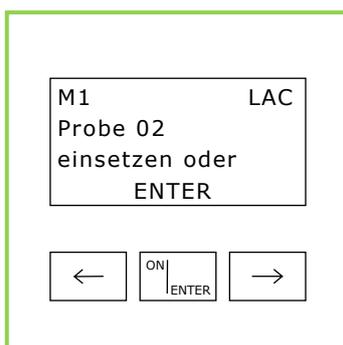

**5.** Nullpunkteinstellung: Küvette mit Probe (Bild 3) in das Photometer stellen, Nullpunkt wird vom Gerät gespeichert


Nach Signalton Küvette entfernen



**6.** Verschlusskappe gegen Startkappe austauschen



**7.** Küvette mehrmals über Kopf schwenken

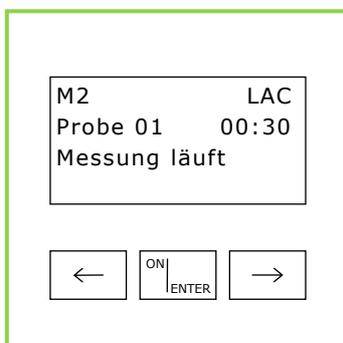

**8.** Zuerst ON/ENTER drücken und erst **danach** die Küvette in das Photometer stellen



**9.** Zeitablauf wird angezeigt, Messwert abwarten