



Anleitung Schritt für Schritt

HSR 342

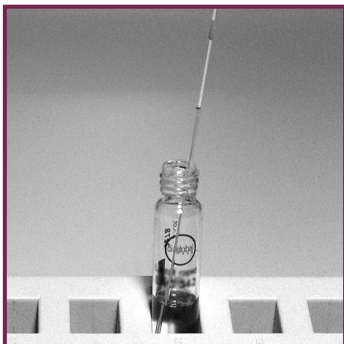

1. Kapillare mit 100 μ L Probe (Serum/Plasma) in die geöffnete Küvette stellen
Die Probe mit dem Mikropipetter ausstoßen und mehrfach spülen

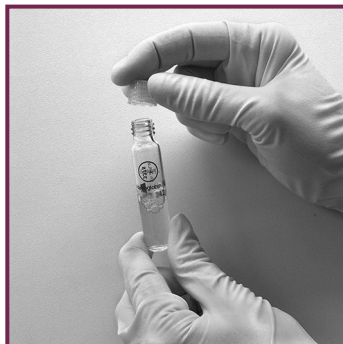


2. Verschlusskappe gegen Startkappe austauschen




3. Küvette mehrmals über Kopf schwenken




4. Küvette 10 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen

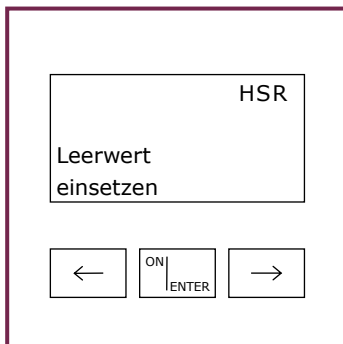

5. Gerät mit ON/ENTER einschalten
Gerätecheck abwarten, mit ON/ENTER bestätigen
HSR auswählen, mit ON/ENTER bestätigen

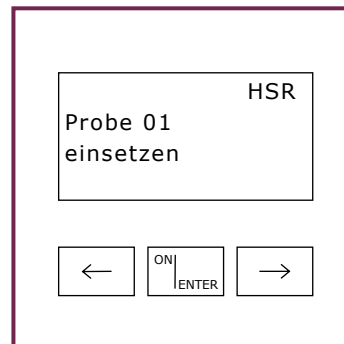

6. Nullpunkteinstellung: Unbearbeitete Küvette aus der Packung nehmen und in das Photometer stellen
Nullpunkt wird vom Gerät gespeichert

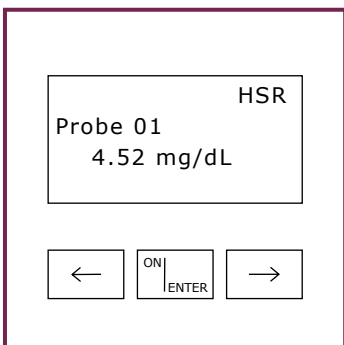

7. Nach Ablauf der Wartezeit von 10 Minuten Küvette (Bild 4) ins Gerät einsetzen
Messwert ablesen



Hinweis zur Serienmessung:
Nach der Nullpunkteinstellung können beliebig viele weitere Proben gemessen werden